



A. Seitensicherungen

Um die Seitensicherungen hochzustellen, greifen Sie einfach in die Griffaussparungen und heben Sie sie zuerst kopfseitig und dann fußseitig bis zum hörbaren Anschlag an.

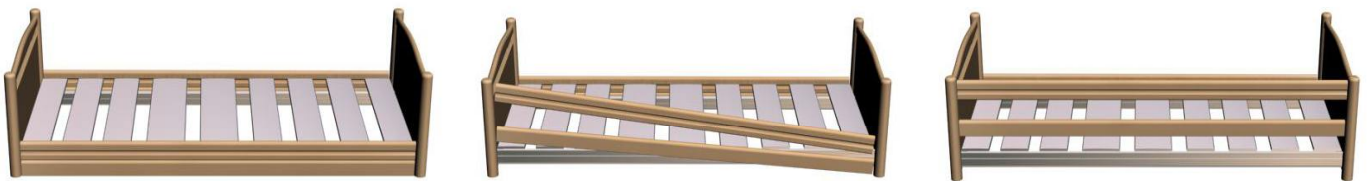

Um die Seitensicherungen herabzulassen, greifen Sie in die Griffaussparungen und heben Sie sie leicht an, drücken Sie den seitlich angebrachten Sicherungsknopf und führen Sie schließlich die Seitensicherung mit der Hand nach unten. Lassen Sie dabei zuerst die fußseitige und dann die kopfseitige Seitensicherung herab.

B. Patientenhandschalter

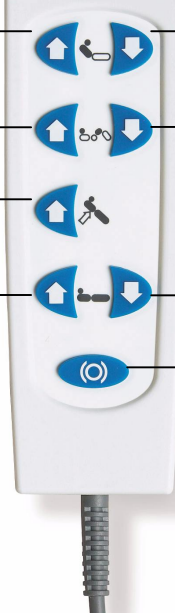- 
- Liegefläche**
Anheben des Rückenteils
 - Liegefläche**
Anheben des Oberschenkelteils
 - Comfort-Taste**
(Anti-Trendelenburglage)
neigt die gesamte Liegefläche fußseitig ab
 - Höhenverstellung auf**
Hebt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position
 - Liegefläche**
Absenken des Rückenteils
 - Liegefläche**
Absenken des Oberschenkelteils
 - Höhenverstellung ab**
Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position ab
 - Rollenfreischaltung**
Gleichzeitiges Drücken der Tasten 7 und 8 versetzt das Bett in die niedrigste Position und sorgt dafür das die Laufrollen ausgefahren werden.

C. Steuerboxfunktionen

1. Höhenverstellung: Hub „AUF/AB“ :

„Doppelclick“ aufwärts/abwärts bewirkt Anfahren der höchsten bzw. niedrigsten Position. Diese Bewegung kann durch Drücken jeder beliebigen Taste gestoppt werden.

2. Sperrschalter

Sperrt sämtliche Handschalterfunktionen sowie die Hub- und Liegeflächenfunktionen auf dem Schwesternschalter. Trendelenburgpositionen bleiben bedienbar.

3. Trendelenburg-Position

Stufenloses Anfahren der Kopf-Tieflage bis hin zur korrekten Trendelenburg-Position.

4. Anti-Trendelenburg-Position

Stufenloses Anfahren der Fuß-Tieflage bis hin zur korrekten Anti-Trendelenburg-Position.

→ Durch Höhenverstellung in die jeweils höchste oder niedrigste Position bzw. die jeweils entgegengesetzte Tieflagenfunktion werden die Trendelenburg-Positionen aufgehoben.

5. Liegefläche


Anheben/Senken Rückenteil

6. Liegefläche


Anheben/Senken Oberschenkelteil

9. Rollentaste


Gleichzeitiges betätigen der Rollentaste und der „Hub Ab“-Taste macht das Bett fahrbereit.

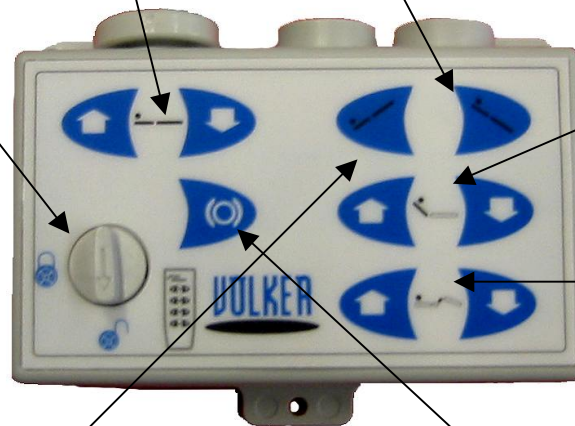

D. Erweiterte Fußteilverstellung

Betätigen der Taste  fährt das Bett in die „Knieknick“-Stellung.

Durch manuelles justieren des Rastomaten kann das Bett in die „Fußhochlage“ gebracht werden.

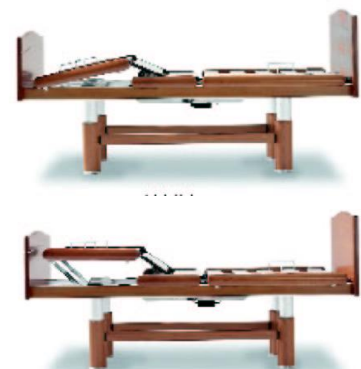

Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Bedienungsanleitung