

# Kurzgebrauchsanweisung


**Modell 2082** ab Baujahr 06/2009

**VÖLKER**

## A. Seitengitter

### Seitengitter hochstellen


Um die Seitengitter hochzustellen, greifen Sie in die Griffmulde und heben Sie diese zuerst kopfseitig und dann fußseitig bis zum hörbaren Einrasten an.

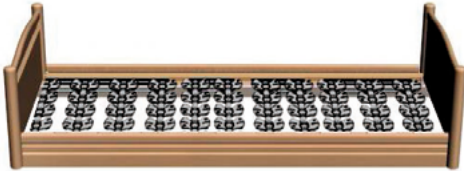


### Seitengitter herablassen

Um die Seitengitter herabzulassen, greifen Sie in die Griffmulde und heben Sie diese leicht an.

Drücken Sie den seitlich angebrachten Sicherungsknopf und lassen Sie dann die Seitengitter mit der Hand zuerst fußseitig und danach kopfseitig herunter.

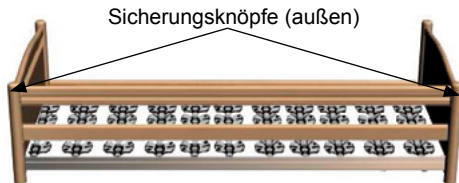

## B. Handschalter

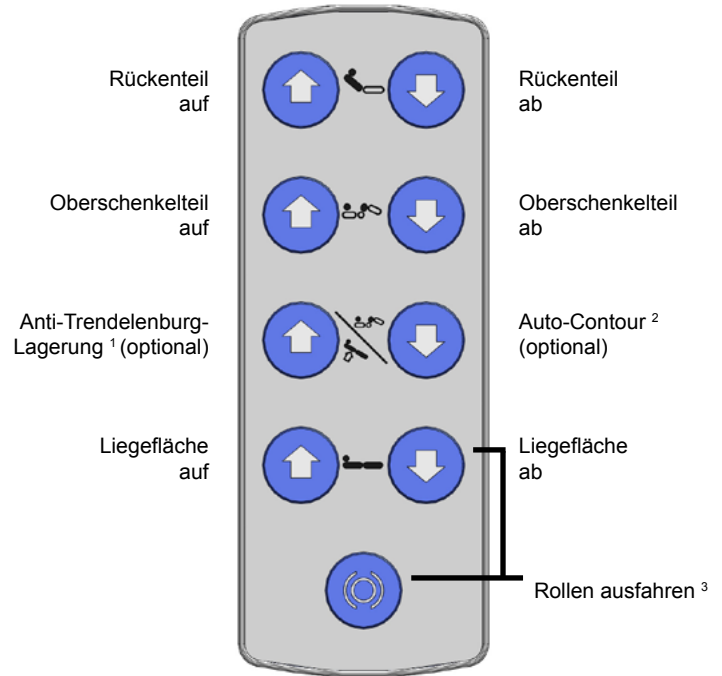

<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

<sup>3</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

# Kurzgebrauchsanweisung

Modell 2082 ab Baujahr 06/2009

VÖLKER

## C. Tastensperre des Handschalters

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalters werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt.




Handschalter gesperrt



Handschalter entsperrt

Der Handschalter kann auch durch die Taste „Handschalter sperren“ (14) an der Personaltastatur gesperrt werden.

## D. Personaltastatur mit Komplettsperrung (Option)

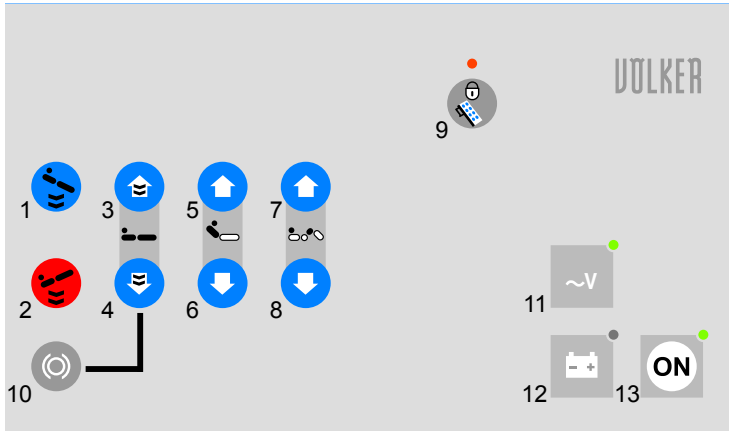

- |   |  |    |                                   |
|---|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Anti-Trendelenburg-Lagerung <sup>1,7</sup> | 8  | Oberschenkelteil ab               |
| 2 | Trendelenburg-Lagerung <sup>2,7</sup>      | 9  | Handschalter sperren              |
| 3 | Liegefläche auf <sup>7</sup>               | 10 | Rollen ausfahren <sup>3</sup>     |
| 4 | Liegefläche ab <sup>7</sup>                | 11 | Netzspannungsanzeige <sup>4</sup> |
| 5 | Rückenteil auf                             | 12 | Akkuanzeige <sup>5</sup>          |
| 6 | Rückenteil ab                              | 13 | Einschalten <sup>6</sup>          |
| 7 | Oberschenkelteil auf                       |    |                                   |

<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> Kopftiefenlagerung

<sup>3</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

<sup>4</sup> grün: Netzspannung liegt an

<sup>5</sup> grün: >80% geladen; gelb: 30-80% geladen; rot: entladen; blinkend: wird geladen

<sup>6</sup> nach Drücken der Taste ist die Tastatur bis 120 sec. nach der letzten Betätigung verfügbar, danach sperrt sie sich automatisch

<sup>7</sup> länderspezifisch Automatikfunktion durch Doppelklick möglich

**HINWEIS** Bitte beachten Sie, dass die Personaltastatur durch Drücken der „ON“-Taste eingeschaltet werden muss, um das Bett zu bedienen. Sollte keine elektrische Funktion mehr anzusprechen sein, drücken Sie den grünen Resetknopf am Motorgehäuse. Sollte danach die Akkuanzeige rot leuchten, ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker. Nach dem Wiedereinstecken des Netzsteckers ist der grüne Knopf an der Netzfreeschaltung zu drücken, um das Bett wieder in Betrieb zu nehmen. Es sollten niemals beide grüne Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden.

**HINWEIS** Das Bett ist nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet (IPX4).

**HINWEIS** Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!