

A. Elektrische Inbetriebnahme:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzversorgung (Steckdose).
2. Drücken Sie die grüne Taste im Netzstecker 1 Sekunde lang, um den internen Energiespeicher aufzuladen.
- ...⇒ **Bett ist jetzt betriebsbereit.**
3. Führen Sie vor der Belegung eine Funktionsprobe aller Hebe- und Senkfunktionen durch.

B. Funktionsbeschreibung:

1. Liegefläche: Anheben Rückenteil

2. Liegefläche: Senken Rückenteil

3. Höhenverstellung: Hub "AUF"

4. Höhenverstellung: Hub "AB"

8. Bett "bremsen" in die sichere Standfestigkeit: Durch Drücken der grünen Taste 3 Hub "AUF" wird das Bett **automatisch** gebremst und erreicht die sichere Standfestigkeit.

9. Seitensicherung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen bis zur Fixierung. Zum Absenken die Seitensicherung leicht anheben, **Sicherungsknopf** betätigen und das Seitensicherungselement herunterdrücken.




5. Liegefläche: Anheben Beinteil

6. Liegefläche: Senken Beinteil

7. Freigabe Fahrbereitschaft:

Drücken Sie die grüne Taste 4 Hub "AB" zusammen mit der gelben Bremstaste 7 so lange, bis die Spezialrollen ausgefahren sind. ...⇒ **Bett kann jetzt bewegt werden.**

10. Schocklagerung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen am Handgriff. In gewünschter Höhe einrasten lassen. Herunterlassen durch vollständiges Anheben bis zum Anschlag und einfaches Herablassen.

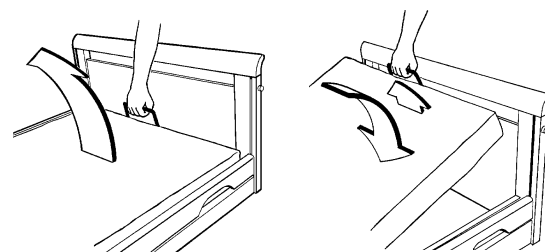

Ausgabe: 1998 A



Völker Möbelproduktionsgesellschaft mbH · Wullener Feld 79 · D-58454 Witten
 Telefon (0 23 02) 960 960 · Telefax (0 23 02) 960 96 16

Ihr Außendienstmitarbeiter: _____ Telefon: _____

A. Elektrische Inbetriebnahme:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzversorgung (Steckdose).
2. Drücken Sie die grüne Taste im Netzstecker 1 Sekunde lang, um den internen Energiespeicher aufzuladen.
- ...⇒ **Bett ist jetzt betriebsbereit.**
3. Führen Sie vor der Belegung eine Funktionsprobe aller Hebe- und Senkfunktionen durch.

B. Funktionsbeschreibung:

1. Liegefläche: Anheben Rückenteil

2. Liegefläche: Senken Rückenteil

3. Höhenverstellung: Hub "AUF"

4. Höhenverstellung: Hub "AB"

8. Bett "bremsen" in die sichere Standfestigkeit: Durch Drücken der grünen Taste 3 Hub "AUF" wird das Bett **automatisch** gebremst und erreicht die sichere Standfestigkeit.

9. Seitensicherung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen bis zur Fixierung. Zum Absenken die Seitensicherung leicht anheben, **Sicherungsknopf** betätigen und das Seitensicherungselement herunterdrücken.




5. Liegefläche: Anheben Beinteil

6. Liegefläche: Senken Beinteil

7. Freigabe Fahrbereitschaft:

Drücken Sie die grüne Taste 4 Hub "AB" zusammen mit der gelben Bremstaste 7 so lange, bis die Spezialrollen ausgefahren sind. ...⇒ **Bett kann jetzt bewegt werden.**

10. Schocklagerung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen am Handgriff. In gewünschter Höhe einrasten lassen. Herunterlassen durch vollständiges Anheben bis zum Anschlag und einfaches Herablassen.

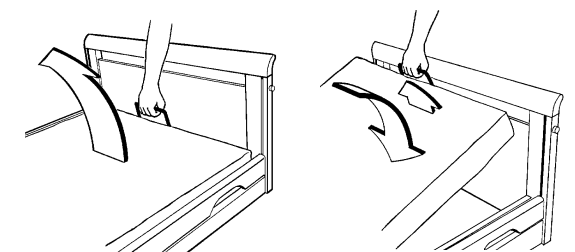

Ausgabe: 1998 A



Völker Möbelproduktionsgesellschaft mbH · Wullener Feld 79 · D-58454 Witten
 Telefon (0 23 02) 960 960 · Telefax (0 23 02) 960 96 16

Ihr Außendienstmitarbeiter: _____ Telefon: _____