

Völker S 960 | Kurzgebrauchsanweisung

A. Bedienung der Seitengitter




Bei Gebrauch sind die Seitensicherungen seitlich waagrecht herauszuziehen, hochzuklappen und einzurasten. Zum Absenken den unten an der Seitensicherung befindlichen Sicherungsstift ziehen, Seitensicherung leicht anheben, wegklappen und in die Liegefläche einschieben. Die waagrecht herausgezogene Seitensicherung kann auch als Bettzeug-Ablage oder für medizinisch notwendige Patientenlagerungen genutzt werden.



B. Schnellabsenkung (CPR)



Eine Schnellabsenkung des Rückenteils (CPR) erfolgt im Bedarfsfall durch einfaches Lösen der Arretierung an der Liegefläche. Die Funktionsaufnahme nach der Rückenteilverstellung erfolgt ohne Nachjustierung.

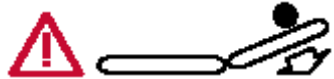


C. Schnellabnahme von Kopf- und Fußteil



Kopf- und Fußteil sind mit Schnellverschluss im Rahmen fixiert und lassen sich bei Bedarf leicht herausnehmen.

D. Funktionen der Personaltastatur (fußseitig herausziehbar)

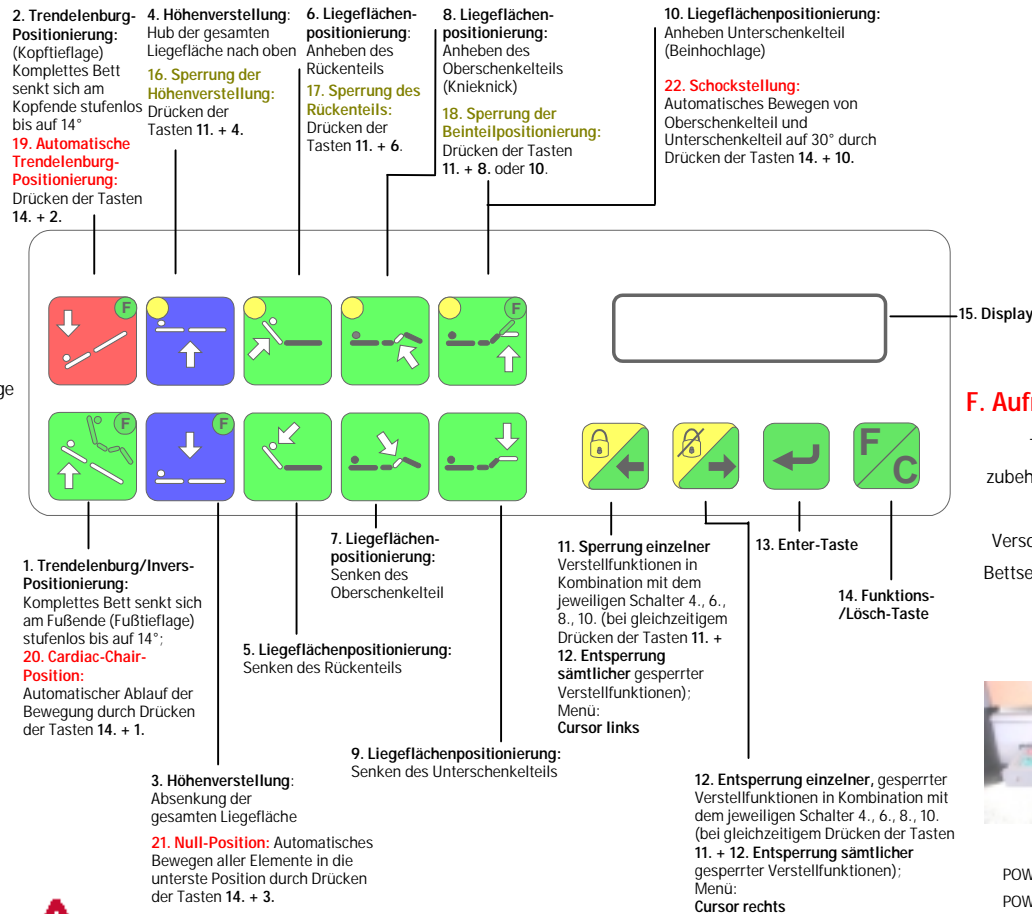

Achtung: Alle automatisch ablaufenden Funktionen (🟢) können durch Drücken jeder beliebigen Taste der Personaltastatur oder des Handschalters abgebrochen werden!



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!




Völker GmbH · Ahornstraße 4 · D-09661 Hainichen
Telefon (037207) 56 99 0 · Telefax (037207) 56 99 16

Ihr Außendienstmitarbeiter:

Telefon:

E. 4-Rollen-Zentralbremsung

Über einen Bremsbügel lassen sich die Laufrollen für einen festen Stand blockieren (a) bzw. zum Transport freigeben (b). Der Geradeauslauf (Spureinstellung) wird ebenfalls über den Bremsbügel (c) eingestellt.

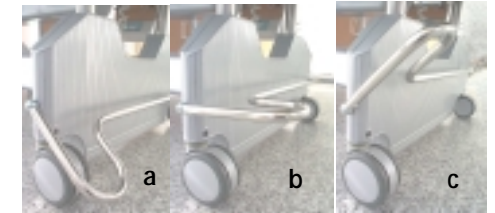

F. Aufnahme von Zubehör- und Therapie-Geräten

Therapiegeräte und Pflege-zubehör werden per Adapter von vor- und rückschiebbaren Versorgungsschienen an beiden Bettseiten flexibel aufgenommen und können je nach Bedarf positioniert werden.



POWER-LED grün - Ladegerät angesteckt
POWER-LED aus - Ladegerät nicht angesteckt



Bett am Standplatz immer mit Ladegerät verbinden, um optimalen Ladezustand zu garantieren!

G. Bedienung des Handschalters

